

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ALDOLASE CALIBRATOR

(Tên trên vỏ hộp: ALS CAL)

Mã code sản phẩm: AD 5000

Đóng gói: 3 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Aldolase máy xét nghiệm sinh hóa.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hóa chất hiệu chuẩn để xây dựng đường cong hiệu chuẩn cho xét nghiệm aldolase trên máy xét nghiệm sinh hóa. Các giá trị hiệu chuẩn cho các điểm được cung cấp trong kit insert đi kèm theo hộp hóa chất của nhà sản xuất.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Các hoá chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích *in vitro*. Không pipet bằng miệng. Sử dụng và xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Yêu cầu nếu bạn cần các tờ công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS).

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

CHUẢ MỞ NẮP: Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ổn định đến hạn in trên từng lọ.

SAU KHI MỞ NẮP: Sau khi hoàn nguyên ổn định trong vòng 5 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hóa chất này dạng đông khô.

1. Cẩn thận hoàn nguyên từng lọ chuẩn với 1 ml nước cất. Đóng chai và để cho đứng trong 30 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo nội dung được tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng. Tránh sự hình thành bọt. Đừng lắc.

2. Tham khảo phần điều khiển của ứng dụng phân tích cá nhân..

3. Làm lạnh bất kỳ vật liệu không sử dụng. Trước khi sử dụng lại, hãy trộn đều nội dung trong ống nghiệm bằng tay hoặc bằng dụng cụ tự động.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Ổn định không bắt buộc.

VẬT LIỆU SẴN CÓ

Aldolase Calibration Serum 3 x 1 ml

VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Pipet đo thể tích

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Các giá trị được chỉ định kiểm định nội bộ tại Randox Laboratories Ltd. và so với lô hàng chính được lưu trữ ở -80°C

	Assigned Value (U/l)
Aldolase	21.3

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com