

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ALDOLASE CONTROL LEVEL 2

(Tên trên vỏ hộp: ALS CONTROL 2)

Mã code sản phẩm: AD 5002

Đóng gói: 3 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm Aldolase dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Được thiết kế tương tự như mẫu bệnh nhân, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót trong xét nghiệm bằng cách so sánh kết quả phân tích hóa chất với giá trị được cung cấp trong kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất. Kiểm tra được xét nghiệm Aldolase.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Các hoá chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích *in vitro*. Không pipet bằng mồm. Sử dụng và xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Yêu cầu nếu bạn cần các tờ công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS).

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

CHỨA MỞ NẮP: Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ổn định đến hạn in trên từng lọ.

SAU KHI MỞ NẮP: Sau khi hoàn nguyên ổn định trong vòng 5 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hóa chất này dạng đông khô.

1. Cẩn thận hoàn nguyên từng lọ của huyết thanh chuẩn với 1 ml nước cất. Đóng chai và để cho đứng trong 30 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo nội dung được giải thể hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng. Tránh sự hình thành bọt. Không lắc.

2. Làm lạnh bất kỳ vật liệu không sử dụng. Trước khi sử dụng lại, hãy trộn đều nội dung bằng cách đảo nhẹ lọ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Ổn định không bắt buộc.

VẬT LIỆU SẴN CÓ

Aldolase Level 2 Control 3 x 1 ml

VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Pipet đo thể tích

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Các giá trị được chỉ định kiểm định nội bộ tại Randox Laboratories Ltd. và so với lô hàng chính được lưu trữ ở -80°C.

	Assigned Value (U/l)	Range (U/l)
Aldolase	21.6	16.2 - 27.0

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com