

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### ADIPONECTIN CALIBRATOR

(Tên trên vỏ hộp - ADPN CAL)

**Mã code sản phẩm:** AO 2800

**Đóng gói:** 4 x 1 ml

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất Randox Adiponectin Calibrator Series được thiết kế để sử dụng trong việc hiệu chuẩn các xét nghiệm Adiponectin.

### CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu

### BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Adiponectin Calibrators ổn định cho đến ngày hết hạn được in trên các lọ riêng lẻ khi được bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C, nếu được giữ trong hộp đựng ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào **KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI** vào lọ ban đầu.

### CHUẨN BỊ

Adiponectin Calibrators sẵn sàng để sử dụng

### GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Giá trị ấn định cho Adiponectin Calibrators được liệt kê bên dưới.

| CAL. NO. | LOT NO. | NỒNG ĐỘ  | HẠN SỬ DỤNG |
|----------|---------|----------|-------------|
| 1        | 117AO   | 5 µg/ml  | 2017-08-28  |
| 2        | 118AO   | 10 µg/ml | 2017-08-28  |
| 3        | 119AO   | 20 µg/ml | 2017-08-28  |
| 4        | 120AO   | 40 µg/ml | 2017-08-28  |

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: [gsmmed.trang@gmail.com](mailto:gsmmed.trang@gmail.com)