

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BLOOD GAS CONTROL LEVEL 1

(Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ thấp)

Tên trên vỏ hộp: BG CONTROL 1

Mã code sản phẩm: BG5001

Đóng gói: 30 x 1.8 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Blood Gas Control Level 1 được thiết kế để nội kiểm tra chất lượng các xét nghiệm khí máu bằng phương pháp *in vitro*.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm khí máu bao gồm 3 mức: mức 1, mức 2 và mức 3. Và kiểm tra được 10 thông số xét nghiệm: pCO₂, pH, pO₂, Total CO₂, Calcium, Chloride, Glucose, Lactate, Potassium, Sodium.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Sản phẩm chỉ được sử dụng cho mục đích *in vitro*. Không dùng pipet bằng miệng. Sử dụng và xử lý cẩn thận tương tự như các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỐN ĐỊNH

CHƯA MỞ NẮP: Ông định đến hạn sử dụng khi được bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Tránh để mẫu đông lạnh hoặc tiếp xúc với nhiệt độ lớn hơn +30°C.

SAU KHI MỞ NẮP: Đối với các giá trị pH/khí máu, nên được phân tích trong vòng 1 phút sau khi mở và trong vòng 1 giờ đối với các phép đo điện giải.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Sản phẩm nên được đưa về nhiệt độ + 20°C đến + 23°C trước khi sử dụng. Để ít nhất 4 giờ để các ống cân bằng với nhiệt độ này, trước khi phân tích. Trước khi sử dụng, giữ ống hoá chất ở phía trên và phía dưới (bằng ngón trỏ và ngón cái) và lắc 15-20 lần để trộn đều dung dịch. Nhấn vào ống để khôi phục chất lỏng xuống đáy ống. Mở ống bằng cách bấm vào đầu ở điểm đã đánh dấu. Sử dụng gạc, khăn giấy, găng tay hoặc dụng cụ mở ống thích hợp để bảo vệ ngón tay khỏi bị đứt tay. Đưa ngay chất lỏng từ ống vào máy phân tích.

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

Blood Gas Control - Level 1 30 x 1.8 ml

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô sản phẩm nội kiểm khí máu được phân phối đến 1 số phòng xét nghiệm không thuộc nhà sản xuất và các giá trị nội kiểm sẽ được tính toán từ kết quả thống kê của các phòng xét nghiệm đó.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.hotrokythuat@gmail.com