

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### LIQUID CSF CONTROL - LEVEL 2

(Tên trên vỏ hộp: CSF CONTROL 2)

**Mã code sản phẩm:** CF 10139

**Đóng gói:** 10 x 3 ml

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất kiểm tra độ chính xác và lặp lại của các xét nghiệm dịch não tủy sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Được thiết kế tương tự mẫu bệnh nhân có thành phần chứa dịch não tủy, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót bằng cách so sánh kết quả phân tích với các giá trị nội kiểm được cung cấp trong kit insert đi kèm trong hộp hóa chất của nhà sản xuất.

### CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Các hoá chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích *in vitro*. Không pipet bằng mồm. Sử dụng và xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Hãy yêu cầu nếu bạn cần các tờ công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS).

### BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

**CHƯA MỞ NẮP:** Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ổn định đến hạn in trên từng lọ.

**SAU KHI MỞ NẮP:** Sau mở lọ ổn định 30 ngày ở 2-8°C.

### CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng. Cho vào máy phân tích trong điều kiện giống mẫu bệnh nhân. So sánh kết quả phân tích với các giá trị được cung cấp trong tờ kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

### VẬT LIỆU SẴN CÓ

CSF Control - Level 2 10 x 3 ml

### VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Pipet đo thể tích

### CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô CSF đã được kiểm tra ở một số phòng xét nghiệm bên ngoài. Các giá trị được chỉ định từ một sự đồng thuận của các kết quả thu được từ các phòng xét nghiệm và kiểm tra nội bộ được thực hiện tại Randox Laboratories Ltd.

Nếu phương pháp đó không có hiệu lực, hãy liên hệ với phòng kỹ thuật của Randox Dịch vụ Kỹ thuật, Bắc Ireland, điện thoại: +44 (0) 28 9445 1070 hoặc email [Technical.Services@randox.com](mailto:Technical.Services@randox.com).

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: [gsmmed.trang@gmail.com](mailto:gsmmed.trang@gmail.com)