

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CK-MB CONTROL (UV-Method)

Mã code sản phẩm: CK 1212

Đóng gói: 10 x 2 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm CK- MB cho máy xét nghiệm sinh hóa

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Được thiết kế tương tự như mẫu bệnh nhân, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót trong xét nghiệm bằng cách so sánh kết quả phân tích hóa chất với giá trị được cung cấp trong kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất. Kiểm tra độ chính xác, lặp lại của thông số xét nghiệm CK-MB (Activity) và CK-NAC

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Các hoá chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích *in vitro*.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận . Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bảo quản ở 2 - 8°C.

Hạn dùng: đến ngày hết hạn khuyến cáo của nhà sản xuất, khi được bảo quản ở 2- 8°C. Sau hoàn nguyên ổn định trong vòng 5 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C hoặc 28 ngày ở -20 °C.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hóa chất này dạng đông khô.

Mở nắp cẩn thận tránh thất thoát hóa chất, hoàn nguyên với chính xác 2ml nước cất 2 lần. Đóng nắp lọ và để nguyên 15 phút, bảo đảm tan hoàn toàn bằng cách đảo hoặc lắc nhẹ nhàng.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.trang@gmail.com