

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CK-MB CALIBRATOR

(Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB)

Tên trên vỏ hộp: **CK-MB CAL**

Mã code sản phẩm: CK 2393

Đóng gói: 10 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Chất hiệu chuẩn dùng để hiệu chuẩn cho thông số xét nghiệm định lượng CK-MB
(trên hệ thống hóa học lâm sàng)

CHUẨN BỊ HUYẾT THANH

Mở một lọ kiểm soát huyết thanh cẩn thận, tránh làm mất vật liệu, và hoàn nguyên đúng 1 ml nước cất. Đậy lọ và để yên trong 15 phút, hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay hoặc xoay nhẹ.

ĐỘ ỔN ĐỊNH

CHƯA MỞ: Ổn định đến hạn sử dụng khi được bảo quản ở nhiệt độ + 2°C đến + 8°C.

ĐÃ MỞ: CK-MB sau khi hoàn nguyên sẽ ổn định trong huyết thanh trong 5 ngày ở +4°C , 8 giờ ở + 25 °C và 4 tuần ở -20 °C khi đông lạnh một lần.

AN TOÀN

Vật liệu nguồn gốc từ con người, đã được xét nghiệm ở cấp độ người hiến tặng để tìm kháng thể Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV 1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể Vi-rút viêm gan C (HCV) và được phát hiện là KHÔNG PHẢN ỨNG. Các phương pháp được FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm này.

Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân gây nhiễm trùng, nên vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh nhân phải được xử lý như thể có khả năng lây truyền các bệnh truyền nhiễm và phải được xử lý phù hợp.

Chỉ sử dụng cho mục đích chẩn đoán IN VITRO.

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

*Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.randox.com/> để biết thêm chi tiết.*

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com