

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### LIDUID BNP CONTROL (SIEMENS ADVIA CENTAUR) – LEVEL 2

(Tên trên vỏ hộp: BNP CONTROL 2)

**Mã code sản phẩm:** CQ5140

**Đóng gói:** 3 x 1 ml

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này được dùng cho việc sử dụng chẩn đoán *in vitro*, trong việc kiểm chuẩn chất lượng của BNP trên máy phân tích của Siemens Advia Centaur.

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

The liquid BNP control là dạng lỏng có 3 mức là: mức 1, 2 và 3. Các giá trị và dải mục tiêu chỉ được cung cấp cho BNP.

### CÁC BIỆN PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN:

Các hóa chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích *in vitro*. Không hút mẫu bằng miệng. Sử dụng và xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra kháng thể suy giảm miễn dịch ở người (HIV 1, HIV 2), kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg), kháng thể virus viêm gan siêu vi B (HBV DNA), kháng thể viêm gan siêu vi C (HCV) và được tìm thấy là “*không phản ứng*”. Phương pháp đã được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm.

Các Bảng Dữ liệu về Sức khỏe và An toàn được cung cấp theo yêu cầu

### BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

**Trước khi mở nắp:** Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ổn định đến ngày hết hạn in trên từng lọ riêng lẻ.

**Sau mở nắp:** Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ổn định trong vòng 30 ngày ở +2°C đến +8°C nếu giữ trong hộp gốc và không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết và sau đó thay thế nắp. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm nào còn thừa KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI vào lọ ban đầu.

### CHUẨN BỊ HÓA CHẤT.

Hóa chất này ở dạng lỏng sẵn sàng sử dụng.

### VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP:

Liquid BNP Control – Level 2

3 x 1 ml

### VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP:

Không áp dụng

### GIÁ TRỊ CHỈ ĐỊNH

Mỗi lô BNP lỏng được gửi cho các phòng xét nghiệm bên ngoài. Các giá trị được xác định từ sự thống nhất các kết quả thu được ở phòng xét nghiệm và những kiểm tra nội bộ được thực hiện tại Randox Laboratories Ltd.

Máy phân tích	Đơn vị	Điểm chuẩn	Giới hạn điểm chuẩn
Siemens Advia Centaur	pg/ml	531	425 – 637
Siemens Advia Centaur	pmol/l	154	123 – 185

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối khối của hãng tại Việt Nam:

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: [gsmmed.trang@gmail.com](mailto:gsmmed.trang@gmail.com)