

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CYSTATIN C CALIBRATOR SET

(Tên trên vỏ hộp: CYSC CAL)

Mã code sản phẩm: CYS 2699

Đóng gói: 5 x 2 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm thông số Cystatin C cho máy xét nghiệm sinh hóa .

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hóa chất hiệu chuẩn máy để xây dựng đường cong hiệu chuẩn cho xét nghiệm Cystatin C trên máy xét nghiệm sinh hóa với các giá trị hiệu chuẩn được cho sẵn trong tờ kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

Kiểm tra độ chính xác và lặp lại của xét nghiệm đối với thông số Cystatin C.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bảo quản ở 2 - 8°C.

Hạn dùng: đến ngày hết hạn khuyến cáo của nhà sản xuất, khi được bảo quản ở 2- 8°C. Sau mở nắp ổn định trong vòng 30 ngày khi bảo quản ở 2 - 8°C.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng, mở nắp cho vào máy chạy hiệu chỉnh 6 điểm theo các giá trị kèm theo lô sản xuất.

GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Sự phân định Cystatin C Calibrator đã được thực hiện tại Phòng xét nghiệm Randox bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục cường phủ latex, có tham khảo các tài liệu được chuẩn hóa so với tiêu chuẩn của IFCC.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.trang@gmail.com