

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CYSTATIN C ELEVATED CONTROL

(Tên trên vỏ hộp: CYSC CONTROL 3)

Mã code sản phẩm: CYS 5020

Đóng gói: 3 x 2 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm Cystatin C mức cao cho máy xét nghiệm sinh hóa.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Được thiết kế tương tự như mẫu bệnh nhân, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót trong xét nghiệm bằng cách so sánh kết quả phân tích hóa chất với giá trị được cung cấp trong kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất. Kiểm tra độ chính xác, lặp lại của xét nghiệm Cystatin C.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ sử dụng trong xét nghiệm in vitro.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bảo quản ở 2 - 8⁰C.

Hạn dùng: đến ngày hết hạn khuyến cáo của nhà sản xuất, khi được bảo quản ở 2- 8⁰C. Sau hoàn nguyên ổn định trong vòng 30 ngày khi bảo quản ở 2 - 8⁰C.

GIÁ TRỊ

3.19 mg/l 2.87 - 3.51 mg/

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng, mở nắp cho vào máy chạy hiệu chỉnh 6 điểm theo các giá trị kèm theo lô sản xuất.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com