

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MULTIDRUG CONTROL LEVEL 1

(Tên trên vỏ hộp - DOA CONTROL 1)

Mã code sản phẩm: DA 3121

Đóng gói: 5 x 5 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Chất chuẩn mức 1 Multidrug của Randox được sử dụng để kiểm tra chất lượng Methamphetamine, Barbiturates, Cocaine, Methadone và Opiates trên các máy phân tích dòng RX, bao gồm cả RX **daytona** và RX **imola**. Kiểm chuẩn mức 1 chứa các loại thuốc cụ thể Methamphetamine, Secobarbital, Benzoylcegonine, Methadone và Morphine

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Vật liệu kiểm soát chất lượng có nguồn gốc từ nước tiểu người thu được từ các nhà tài trợ tình nguyện. Khuyến cáo rằng sản phẩm này được xử lý với các biện pháp phòng ngừa tương tự được sử dụng cho các mẫu bệnh nhân.

Chỉ sử dụng trong chẩn đoán *in vitro*. Không hút mẫu bằng miệng. Exercise the normal precautions required for handling laboratory reagents.

Tất cả các thuốc thử có chứa Natri Azide (0,05%). Tránh ăn hoặc tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Trong trường hợp tiếp xúc với da, rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng với nhiều nước. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc nếu nuốt phải, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Natri Azide phản ứng với chì và ống nước bằng đồng, tạo thành các azide có khả năng gây nổ. Khi thải bỏ các thuốc thử như vậy, xả với một lượng nước lớn để ngăn chặn azide tích tụ. Bề mặt kim loại tiếp xúc nên được làm sạch bằng 10% natri hydroxit.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Trước khi mở nắp: Chất chuẩn Multidrug mức 1 cung cấp để sẵn sàng sử dụng, và ổn định đến ngày hết hạn khi được giới hạn và bảo quản ở nhiệt độ từ +2 đến +8°C trong trường hợp không bị nhiễm bẩn.

Sau khi mở nắp: sau khi mở, hóa chất ổn định trong 28 ngày ở nhiệt độ từ +2 đến +8°C. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm nào còn dư KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI vào lọ ban đầu.

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Giá trị ắn định của vật liệu Multidrug Quality Control đã được thực hiện tại Randox Laboratories. Các giá trị này được liệt kê dưới đây. Mỗi phòng xét nghiệm nên thiết lập phạm vi kiểm soát phù hợp theo mỗi quy trình QC riêng

	Units	Target
Methamphetamine	ng/ml	750
Secobarbital	ng/ml	150
Benzoylcegonine	ng/ml	225
Methadone	ng/ml	225
Morphine	ng/ml	1500

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.trang@gmail.com