

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AMMONIA ETHANOL CONTROL - LEVEL 2 (NH₃/EtOH CONTROL 2)

(Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol nồng độ trung bình)

Tên trên vỏ hộp: NH₃/EtOH CONTROL 2

Mã code sản phẩm: EA 1367

Đóng gói: 6 x 2 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Radox Ammonia Ethanol Control Level 2 được dùng để chẩn đoán trong ống nghiệm, kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ammonia và Alcohol để theo dõi độ lặp lại và phát hiện các sai lệch phân tích có trên các hệ thống hóa sinh lâm sàng.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Không hút pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn theo yêu cầu

BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH

CHƯA MỞ: Nguyên liệu ổn định đến hạn sử dụng khi được bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C, nếu được đặt nắp trong vật chứa ban đầu và không bị nhiễm bẩn.

ĐÃ MỞ: Vật liệu ổn định trong 30 ngày ở +2°C đến +8°C trong các lọ đã mở. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, **KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI** bất kỳ sản phẩm còn dư nào vào lọ ban đầu.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Ammonia Ethanol controls được cung cấp sẵn sàng để sử dụng.

VẬT LIỆU CUNG CẤP

Ammonia Ethanol Control - Level 2 6 x 2 ml

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Các giá trị được ấn định cho từng lô Ammonia Ethanol controls tại Radox Laboratories Ltd. Tuy nhiên, các biến thể có thể do thiết bị, thuốc thử và kỹ thuật phòng xét nghiệm gây ra. Do đó, các phạm vi được cung cấp ở đây chỉ nên được coi là tham chiếu và mỗi phòng xét nghiệm nên thiết lập các phạm vi trung bình và chấp nhận được của riêng mình.

*Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.radox.com/> để biết thêm chi tiết.*

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com