

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

H-FABP CONTROL 1

(Tên trên vỏ hộp- **Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein Control Level 1**)

Mã code sản phẩm: FB 4026

Đóng gói: 3 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

The Randox H-FABP Control mức 1 được thiết kế để sử dụng trong việc kiểm soát chất lượng H-FABP trên các máy phân tích RX, bao gồm cả RX daytona và RX imola. Hóa chất nội kiểm có chứa protein liên kết axit béo từ tim (H-FABP).

MÔ TẢ SẢN PHẨM

The H-FABP Controls được cung cấp ở 2 mức, mức 1 và mức 2.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

Các thuốc thử phải được sử dụng cho mục đích của nhân viên phòng xét nghiệm có trình độ phù hợp, trong điều kiện phòng xét nghiệm thích hợp.

THÀNH PHẦN THUỐC THỬ

Đông khô 19 mM Dung dịch đệm nước muối, pH 7.2 chứa protein, chất ổn định, chất bảo quản và H-FABP

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Không làm đông

Chưa mở: bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C cho đến ngày hết hạn của sản phẩm.

Đã mở: sau hoàn nguyên ổn định trong 35 ngày ở + 2°C đến + 8°C, khi được lưu trữ trong lọ ban đầu. Chỉ yêu cầu số lượng sản phẩm nên được loại bỏ. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào cũng KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI lọ ban đầu. Các lọ sau hoàn nguyên ổn định trong 8 tuần ở nhiệt độ -20 ° C, đông lạnh một lần

VẬT LIỆU CUNG CẤP

H-FABP Control mức 1: 3 x 1 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP

Pipet thể tích

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Hóa chất nội kiểm H-FABP cung cấp dưới dạng đông khô.

1. Mở lọ cẩn thận, tránh làm mất vật liệu.
2. Cẩn thận pha lại mỗi lọ với chính xác 1 ml nước cất ở nhiệt độ + 15°C đến + 25°C.
3. Thay nút cao su, đóng lọ và lăn trong 30 phút tránh ánh sáng.
4. Đảm bảo rằng vật liệu hòa tan hoàn toàn.
5. Không được lắc.

Hóa chất này nên được hoàn nguyên theo hướng dẫn này.

HẠN CHẾ

1. Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng.
2. Không sử dụng sản phẩm nếu nhiễm bẩn.

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Mỗi lô hóa chất H-FABP đều được xét nghiệm miễn dịch độ đục bởi Randox Lab Laboratory Limited, với sự tham khảo của rất nhiều lô về hóa chất hiệu chuẩn H-FABP

GIÁ TRỊ

7.33 ng/ml 5.86 - 8.80 ng/ml

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com