

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GLUTATHIONE REDUCTASE

(Tên trên vỏ hộp - **GLUT RED CONTROL**)

Mã code sản phẩm: GR2608

Đóng gói: 10 x 5 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này dùng cho mục đích kiểm chuẩn xét nghiệm randox glutathione reductase, catalogue number GR2368.

CHUẨN BỊ

Mở lọ thật cẩn thận, tránh làm mất bất kỳ vật liệu nào và hoàn nguyên lại chính xác trong 5 ml nước cất mới ở nhiệt độ + 20 ° c đến + 25 ° c. thay nút cao su, đóng lọ và để yên trong 30 phút trước khi sử dụng.

ĐỘ ỔN ĐỊNH

Chưa mở: Ổn định hết hạn khi được lưu trữ ở + 2°C đến + 8°C.

Đã mở: Sau khi hoàn nguyên, điều khiển ổn định trong 1 ngày ở + 2°C đến + 8°C. hoặc 8 giờ ở + 15 ° C đến + 25 ° C.

AN TOÀN

Hóa chất này được sản xuất từ huyết thanh bò. sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận . Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Chỉ dùng trong ống nghiệm.

GIÁ TRỊ ÁN ĐỊNH

Target value (U/l)	Range (U/l)
80	68 - 92
	-

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com