

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GLUTATHIONE REDUCTASE (Tên trên vỏ hộp - GLUT RED CAL)

Mã code sản phẩm: GR2609

Đóng gói: 10 x 5 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Randox Glutathione Reductase, Catalogue Number GR2368.

CHUẨN BỊ

Mở lọ thật cẩn thận, tránh làm mất bất kỳ vật liệu nào và hoàn nguyên lại chính xác trong 5 ml nước cất mới ở nhiệt độ + 20 ° C đến + 25 ° C. Thay nút cao su, đóng lọ và để yên trong 30 phút trước khi sử dụng.

ĐỘ ỔN ĐỊNH

Chưa mở: Ổn định đến ngày hết hạn, khi được lưu trữ ở + 2°C đến + 8°C.

Đã mở: Sau khi hoàn nguyên, hiệu chuẩn ổn định trong 1 ngày ở + 2 ° C đến + 8 ° C hoặc 8 giờ ở + 15 ° C đến + 25 ° C.

AN TOÀN

Mẫu có nguồn gốc từ con người, từ đó sản phẩm này được tạo ra, đã được thử nghiệm ở cấp độ của người hiến tặng cho kháng thể Virus (HIV 1, HIV 2), kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể viêm gan C (HCV) KHÔNG PHẢN ỨNG. Các phương pháp này đã được công nhận bởi FDA và được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm này.

Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân truyền nhiễm, nên vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh nhân phải được xử lý như thể có khả năng truyền bệnh truyền nhiễm và xử lý cho phù hợp.

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Calibration value (U/l)	63
--------------------------------	-----------

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com