

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HbA1c CONTROL SET (LEVEL 1 AND LEVEL 2)

(Tên trên vỏ hộp: HbA1c CONTROL)

Mã code sản phẩm: HA 5072

Đóng gói: 2 x 2 x 0.5 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất kiểm tra độ chính xác và lặp lại của xét nghiệm đối với hai thông số HbA1c, Total Haemoglobin sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Được thiết kế tương tự mẫu bệnh nhân có thành phần chứa HbA1c, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót bằng cách so sánh kết quả phân tích với giá trị nội kiểm được cung cấp trong kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

Kiểm tra độ chính xác và lặp lại của xét nghiệm đối với hai thông số HbA1c, Total Haemoglobin.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán *in-vitro* với các thuốc thử và thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo. Không sử dụng khi đã quá hạn sử dụng in trên nhãn.

Chỉ dùng trong xét nghiệm trong ống nghiệm, không pipette bằng miệng. Xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm khác. Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan và giang mai bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không phương pháp nào có thể bảo đảm tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bảo quản ở 2 - 8⁰C.

Sau hoàn nguyên ổn định 28 ngày ở nhiệt độ 2-8⁰C .

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Mở nắp lọ. Thêm 0,5 ml nước khử ion kép. Thay nắp lọ. Lăn và đảo chiều nhẹ nhàng nhiều lần và để yên ở nhiệt độ phòng trong 15 phút. Sau 15 phút, xoay và đảo ngược lọ. Tiếp tục đảo chiều cho đến khi dung dịch trở nên đồng nhất và tất cả các nguyên liệu đông khô được hòa tan hoàn toàn.

VẬT LIỆU SẴN CÓ

Level 1 Control: 2 x 0.5 ml

(HbA1c CONTROL 1)

Level 2 Control: 2 x 0.5 ml

(HbA1c CONTROL 2)

VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Pipet đo thể tích

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô HbA1c được kiểm tra tại một số phòng xét nghiệm bên ngoài và giá trị được chỉ định từ một sự đồng thuận của các kết quả thu được bởi các phòng thí nghiệm này.

Nếu không có phương pháp nào, hãy liên hệ Randox Laboratories - Dịch vụ Kỹ thuật, Bắc Ireland, điện thoại: +44 (0) 28 9445 1070 hoặc email

Technical.Services@randox.com.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam: **Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com