

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control set (Tên trên vỏ hộp: LIQ HbA1c CONTROL)

**Mã code sản phẩm:** HA10155

**Đóng gói:** 2 x 2 x 0.5 ml

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này thiết kế mục đích sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm, dùng để nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Glycated Haemoglobin (HbA1c) trong hệ thống xét nghiệm sinh hóa.

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) controls được cung cấp ở 2 mức, mức 1 và mức 2.

### CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

### BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

**ĐÃ MỞ:** Bảo quản trong tủ lạnh (+ 2°C đến + 8°C). Lọ mở ổn định trong 30 ngày ở + 2°C đến + 8°C, nếu được giữ trong hộp chứa ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào **KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI** vào lọ ban đầu.

**CHƯA MỞ:** Bảo quản trong tủ lạnh (+ 2°C đến + 8°C). Ổn định đến ngày hết hạn in trên lọ.

Nhiễm khuẩn trong máu sẽ làm giảm sự ổn định của nhiều thành phần. Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn lọ phải được loại bỏ và sử dụng lọ mới

### CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

The Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) controls cung cấp dạng lỏng sẵn để sử dụng.

Hóa chất được xử lý giống như mẫu bệnh nhân và phù hợp với kit hoặc thuốc thử đang được sử dụng.

### VẬT LIỆU CUNG CẤP

Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control Level 1     2 x 0.5 ml

Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control Level 2     2 x 0.5 ml

### VẬT LIỆU YÊU CẦU KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Không áp dụng.

### GIA TRỊ ẮN ĐỊNH

Mỗi lô kiểm chuẩn Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control được gửi đến một số phòng xét nghiệm bên ngoài và các giá trị được ấn định từ sự đồng thuận kết quả thu được từ các phòng xét nghiệm này và xét nghiệm nội bộ được thực hiện tại Randox Lab Laboratory Ltd. Với mỗi lô, kiểm chuẩn được cung cấp cho phương pháp riêng lẻ. Phạm vi kiểm soát tương đương với giá trị trung bình được ấn định  $\pm 2$  S.D

Nếu phương pháp không có sẵn, hãy liên hệ với Randox Laboratories - Technical Services, Northern Ireland, tel: +44 (0) 28 9445 1070 or email [Technical.Services@randox.com](mailto:Technical.Services@randox.com).

*Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:*

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: [gsmmed.trang@gmail.com](mailto:gsmmed.trang@gmail.com)