

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HAEMOGLOBIN A1C CALIBRATOR (HbA1C CAL)

(Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Haemoglobin A1c 6 mức nồng độ)

Tên trên vỏ hộp: HbA_{1c} CAL

Mã code sản phẩm: HA 3444

Đóng gói: 5 x 2 ml, 1 x 8 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này được dùng để chẩn đoán trong ống nghiệm, trong hiệu chuẩn HbA_{1c} trên các hệ thống hóa sinh lâm sàng.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Không hút pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Bộ hiệu chuẩn chỉ được sử dụng cho mục đích của nhân viên phòng xét nghiệm có trình độ phù hợp, trong các điều kiện phòng xét nghiệm thích hợp. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo. Rửa kỹ sau khi xử lý. Tránh nuốt phải.

Calibrator Level 1: Dung dịch kiềm chứa 0,4% NaOH.

Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn theo yêu cầu.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Đã mở: Bảo quản lạnh (+2°C đến +8°C). Ổn định đến ngày hết hạn nếu được đóng nắp trong hộp đựng ban đầu và không nhiễm khuẩn

Chưa mở: Bảo quản trong tủ lạnh (+2°C đến +8°C). Ổn định đến ngày hết hạn được in trên từng lọ.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

1. Trộn đảo ít nhất 5 lần để đảm bảo độ đồng nhất trước khi sử dụng.
2. Tham khảo phần hiệu chuẩn của từng ứng dụng máy phân tích.
3. Làm lạnh mọi nguyên liệu chưa sử dụng. Trước khi sử dụng lại, trộn kỹ nội dung.

N.B. Bộ hiệu chuẩn không yêu cầu tiền xử lý

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

Haemoglobin A_{1c} Calibrator Level 1 (1 x 8 ml)

Haemoglobin A_{1c} Calibrator Level 2 (1 x 2 ml)

Haemoglobin A_{1c} Calibrator Level 3 (1 x 2 ml)

Haemoglobin A_{1c} Calibrator Level 4 (1 x 2 ml)

Haemoglobin A_{1c} Calibrator Level 5 (1 x 2 ml)

Haemoglobin A_{1c} Calibrator Level 6 (1 x 2 ml)

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Không có

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Một giá trị (trung bình) đã được ấn định cho bộ hiệu chuẩn này tại Randox Laboratories Ltd.

*Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.randox.com/> để biết thêm chi tiết.*

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com