

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HAEMOGLOBIN F AND A2 CONTROLS - LEVEL 1 AND 2

(Tên trên vỏ hộp: Hb F & A2 CONTROL)

Mã code sản phẩm: HA 5083

Đóng gói: 2 x 2 x 0.2 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Haemoglobin F and A2 Controls cung cấp dưới dạng đông khô cho mục đích kiểm chuẩn để theo dõi độ chính xác của quy trình HbF và HbA2. Mức 2 cũng sử dụng làm điểm đánh dấu vị trí cho thời gian rửa Hemoglobin S trên các xét nghiệm HPLC.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Haemoglobin F and A2 Controls có 2 mức 1 và 2.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Mức 1 và 2 chứa máu người

Cảnh báo: Vật liệu có khả năng sinh học tiềm tàng.

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

ĐÃ MỞ: Lưu trữ trong tủ lạnh (+ 2°C đến + 8°C). Haemoglobin F and A2 Controls sau hoàng nguyên ổn định trong 30 ngày ở (+ 2°C đến + 8°C, nếu được giữ trong lọ đựng ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào cũng KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI vào lọ ban đầu.

CHƯA MỞ: Lưu trữ trong tủ lạnh (+ 2°C đến + 8°C). Ổn định đến ngày hết hạn in trên lọ cá nhân.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Haemoglobin F and A2 Controls cung cấp dạng đông khô.

Cẩn thận hoàn nguyên lại từng lọ vật liệu dung được hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng. Tránh hình thành bọt. không lắc.

VẬT LIỆU CUNG CẤP

Haemoglobin F and A2 Control Level 12 x 0.2 ml

Haemoglobin F and A2 Control Level 22 x 0.2 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP

Nước khử ion kép

Pipet thể tích

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Các giá trị nên được thiết lập bởi từng phòng xét nghiệm.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com