

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIQUID PROTEIN CALIBRATORS (SP CAL (LIQ))

(Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein)

Tên trên vỏ hộp: SP CAL (LIQ)

Mã code sản phẩm: IT 2691

Đóng gói: 5 x 1.0 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein dạng lỏng là sản phẩm chẩn đoán trong ống nghiệm được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm ASO, Complement C3, Complement C4, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgM, Prealbumin, RF, Transferrin, Ceruloplasmin, IgA, IgG.

ĐẶC ĐIỂM

Vật liệu hiệu chuẩn có nguồn gốc từ huyết thanh bình thường thu được từ những người hiến tặng tình nguyện.

Việc ấn định IT2691 đã được thực hiện tại Randox bằng phép đo độ đục miễn dịch có tham chiếu đến vật liệu được tiêu chuẩn hóa theo International Reference Preparations. Các giá trị được chỉ định cho lô được liệt kê bên dưới.

CHUẨN BỊ

Các hiệu chuẩn này được cung cấp sẵn sàng để sử dụng

ĐỘ ỔN ĐỊNH

Vật liệu ổn định đến hết hạn sử dụng khi được bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C trong vật chứa có nắp ban đầu. Các lọ đã mở ổn định trong 30 ngày nếu không bị nhiễm khuẩn. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, **KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI** bất kỳ sản phẩm còn dư nào vào lọ ban đầu.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

Nguồn nguyên liệu từ con người từ đó sản phẩm này được tạo ra đã được xét nghiệm ở cấp độ người hiến tặng để tìm kháng thể vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV 1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể vi rút viêm gan C (HCV) và được phát hiện là **KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG**. Các phương pháp được FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm này.

Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân lây nhiễm, vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh phẩm phải được xử lý như thể có khả năng truyền bệnh truyền nhiễm và xử lý theo đó.

Chỉ dùng cho chẩn đoán trong ống nghiệm.

VẬT LIỆU CẦN THIẾT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Randox Saline Diluent, (Cat. No. SA 3854).

Xin lưu ý rằng cần có 0,9% NaCl làm chất hiệu chuẩn điểm 0 cho **TẤT CẢ** các xét nghiệm. Chúng tôi khuyến dùng Randox Saline Diluent, (Cat. No. SA 3854).

*Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.randox.com/> để biết thêm chi tiết*

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com