

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MATERNAL CONTROL - LEVEL 1

(Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh nồng độ thấp)

Tên trên vỏ hộp: MATERNAL CONTROL 1

Mã code sản phẩm: MSS5024

Đóng gói: 3x1ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Vật liệu kiểm soát dùng để kiểm soát chất lượng cho 6 thông số xét nghiệm định lượng sàng lọc trước sinh 3 mức nồng độ bao gồm: mức nồng độ thấp, mức nồng độ trung bình và mức nồng độ cao theo như catalog của nhà sản xuất xem tại website: <https://www.randox.com/maternal-screening-quality-control/>

MÔ TẢ CỤ THỂ

Maternal Control -Level 1 được thiết kế để nội kiểm tra chất lượng độ chính xác các xét nghiệm sàng lọc trước sinh tại mức 1 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Cụ thể là các thông số xét nghiệm sau: Alpha-fetoprotein, Beta hCG miễn phí, Estriol tự do, Gonadotropin màng đệm ở người, Inhibin A và PAPP-A.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sàng lọc trước sinh chỉ được sử dụng cho mục đích *in vitro*. Không dùng pipet bằng miệng. Sử dụng và xử lý cẩn thận tương tự như các hóa chất xét nghiệm thông thường khác. Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được thực hiện biện pháp dự phòng và xử lý thích hợp giống mẫu bệnh nhân.

Công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỐN ĐỊNH

SAU KHI MỞ NẮP: Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ốn định trong 7 ngày khi bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C Sau sử dụng, không đổ lại lọ phần huyết thanh thừa đã hút ra ngoài.

TRƯỚC MỞ NẮP: Bảo quản ở +2°C đến +8°C). Ốn định đến hạn sử dụng in trên từng lọ. Sự nhiễm khuẩn của huyết thanh sẽ làm giảm sự ổn định của nhiều thành phần. Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn, lọ phải được loại bỏ và lấy lại một lọ mới.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mở lọ cẩn thận, tránh làm thất thoát vật liệu và hoàn nguyên bằng 1 ml nước cất. Thay nút cao su; Đóng lọ và để yên trong 30 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo rằng tất cả vật liệu đông khô được hòa tan bằng cách xoáy nhẹ.

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

Maternal Control - Level 1 3 x 1 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Nước cất

Pipet định mức

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô sản phẩm Maternal Control Level 1 đều được gửi đến một số phòng xét nghiệm bên ngoài và các giá trị nội kiểm sẽ được ấn định thông qua sự đồng thuận kết quả mà các phòng xét nghiệm này thu được và thử nghiệm nội bộ tại Randox Laboratories Ltd.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.hotrokythuat@gmail.com