

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MATERNAL CONTROL - LEVEL 2

(Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh nồng độ trung bình)

Tên trên vỏ hộp: MATERNAL CONTROL 2

Mã code sản phẩm: MSS5025

Đóng gói: 3x1ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Vật liệu kiểm soát dùng để kiểm soát chất lượng cho 6 thông số xét nghiệm định lượng sàng lọc trước sinh 3 mức nồng độ bao gồm: mức nồng độ thấp, mức nồng độ trung bình và mức nồng độ cao theo như catalog của nhà sản xuất xem tại website: <https://www.randox.com/maternal-screening-quality-control/>

Sản phẩm này được dùng trong ống nghiệm, để kiểm soát chất lượng các phương pháp Alpha-fetoprotein, Free Beta hCG, Free Estriol, Human Chorionic Gonadotropin, Inhibin A và PAPP-A trên các hệ thống hóa học lâm sàng.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

Vật liệu có nguồn gốc từ con người, đã được xét nghiệm ở cấp độ người hiến tặng để tìm kháng thể Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV1 & HIV2), kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể virus viêm gan C (HCV) và được phát hiện là KHÔNG PHẢN ỨNG. Các phương pháp được FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm này.

Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân gây nhiễm trùng, nên vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh nhân phải được xử lý như thể có khả năng lây truyền bệnh.

Vứt bỏ tất cả các vật liệu sinh học theo hướng dẫn của địa phương hoặc quốc gia. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn trên www.randox.com.

Chỉ sử dụng cho mục đích chẩn đoán IN VITRO

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

ĐÃ MỞ: Bảo quản lạnh (+2°C đến +8°C). Huyết thanh đã pha ổn định trong 7 ngày ở +2°C đến +8°C, nếu được đậy nắp trong hộp đựng ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên lấy ra lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI bất kỳ sản phẩm còn sót lại nào vào lọ ban đầu.

CHƯA MỞ: Bảo quản lạnh (+2°C đến +8°C). Ổn định đến ngày hết hạn được in trên từng lọ.

Nhiễm khuẩn huyết thanh đã pha sẽ làm giảm độ ổn định của nhiều thành phần. Nếu nghi ngờ có nhiễm khuẩn, nên loại bỏ lọ đó và pha lại lọ mới.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Mở lọ cẩn thận, tránh làm mất vật liệu và pha lại bằng 1 ml nước cất. Đậy nút cao su; đóng lọ và để yên trong 30 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo rằng tất cả các vết vật liệu khô đều được hòa tan bằng cách xoay nhẹ.

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

Maternal Control - Level 2 3 x 1 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Nước cất

Pipet bầu

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Do sự thay đổi do thiết bị xét nghiệm, thuốc thử xét nghiệm và kỹ thuật phòng xét nghiệm gây ra, các phạm vi được trích dẫn được cung cấp để hướng dẫn. Nên sử dụng các phạm vi này cho đến khi mỗi phòng xét nghiệm thiết lập được phạm vi riêng của mình, dựa trên các yêu cầu của từng phòng xét nghiệm. Mỗi lô kiểm soát sàng lọc trước sinh được gửi đến một số phòng xét nghiệm bên ngoài. Các giá

trị được ấn định từ sự đồng thuận về kết quả thu được từ các phòng xét nghiệm này và xét nghiệm nội bộ được tiến hành tại Randox Laboratories Ltd.

Nếu không có phương pháp nào, hãy liên hệ với Randox Laboratories - Dịch vụ kỹ thuật, Bắc Ireland, điện thoại: +44 (0) 28 9445 1070 hoặc email Technical.Services@randox.com.

*Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.randox.com/> để biết thêm chi tiết.*

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.hotrokythuat@gmail.com