

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TOTAL ANTIOXIDANT STATUS

(Tên trên vỏ hộp -TAS CONTROL)

Mã code sản phẩm: NX 2331

Đóng gói: 5 ml

QC có nguồn gốc từ người.

CHUẨN BỊ

Mở lọ thật cẩn thận, tránh làm mất bất kỳ vật liệu nào và pha lại chính xác trong 5 ml nước cất mới ở nhiệt độ + 20 ° C đến + 25 ° C. Thay nút cao su, đóng lọ và để yên trong 30 phút trước khi sử dụng.

ỔN ĐỊNH

Ổn định trong 2 ngày ở + 2 ° C đến + 8 ° C hoặc 12 giờ ở + 15 ° C đến + 25 ° C.

Target value (mmol/l)	Range (mmol/l)
1.57	1.26 - 1.88

AN TOÀN

Nguyên liệu gốc của con người, từ đó sản phẩm này đã được tạo ra, đã được thử nghiệm ở cấp độ của người hiến tặng cho kháng thể Virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV 1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể Viêm gan C (HCV) KHÔNG PHẢN ỨNG. Các phương pháp được FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm này. Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân gây nhiễm trùng, nên vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh nhân nên được xử lý như thể có khả năng truyền bệnh truyền nhiễm .

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com