

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### TOTAL ANTIOXIDANT STATUS STANDARD

(Tên trên vỏ hộp - TAS CAL)

**Mã code sản phẩm:** NX 2332

**Đóng gói:** 1 ml

#### Tiêu chuẩn

6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid. Nồng độ cụ thể.

#### Quy đổi

336NX = 2.27 mmol/l

#### Chuẩn bị

Hoàn nguyên một lọ với chính xác 1 ml nước khử ion kép.

#### Ổn định

Ổn định trong 2 ngày ở +2°C to +8°C hoặc 1 tháng -20°C.

#### An toàn

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn theo yêu cầu.

*Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:*

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

*Điện thoại: 024.35772266*

*Email: gsmmed.trang@gmail.com*