

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TOTAL ANTIOXIDANT STATUS CALIBRATOR

(Tên trên vỏ hộp - TAS CAL)

Mã code sản phẩm: NX 2615

Đóng gói: 1 ml

Mục đích sử dụng

Sản phẩm này được dùng để hiệu chuẩn của xét nghiệm **TOTAL ANTIOXIDANT**,
Mã sản phẩm: NX2332

Tiêu chuẩn

6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid. Nồng độ cụ thể.

Quy đổi

$354NX = 2.28 \text{ mmol/l}$

Chuẩn bị:

Hoàn nguyên một lọ với chính xác 1 ml nước khử ion kép..

Ổn Định

Chưa mở: Ổn định cho đến khi hết hạn khi được lưu trữ ở + 2°C đến + 8°C.

Đã mở: Sau khi hoàn nguyên, bộ hiệu chuẩn ổn định trong 2 ngày ở +2°C to +8°C hoặc 1 tháng tại -20°C.

An toàn

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn theo yêu cầu..

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com