

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SPECIFIC PROTEIN CONTROL LEVEL 2 (LIQUID)

(Tên trên vỏ hộp: SP CONTROL 2)

Mã code sản phẩm: PS 2683

Đóng gói: 3 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất nội kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Có các đặc tính tương tự như mẫu bệnh nhân, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót trong hệ thống xét nghiệm bằng cách so sánh kết quả phân tích với giá trị được cung cấp trong kit insert đi kèm theo hộp hóa chất.

Kiểm tra được 27 thông số xét nghiệm: AFP, Albumin, a-1-Antitrypsin, a-1-Acid Glycoprotein, a-2-Macroglobulin, ASO, Anti-thrombin III, b-2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Kappa Light Chain, Kappa Light Chain (Free), Lambda Light Chain, Lambda Light Chain (Free), Prealbumin (Transthyretin), RF, RBP, Total Protein, Transferrin

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán *in-vitro* với các thuốc thử và thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo. Không sử dụng khi đã quá hạn sử dụng in trên nhãn.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan và giang mai bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không phương pháp nào có thể bảo đảm tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

CHƯA MỞ NẮP: Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Ổn định đến hạn in trên từng lọ.

SAU KHI MỞ NẮP: Ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ +2°C đến +8°C.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Mở nắp lọ cẩn thận, cho vào máy phân tích trong điều kiện giống với mẫu bệnh nhân

VẬT LIỆU SẴN CÓ

Liquid Assayed Specific Protein Control - Level 2 3 x 1 ml

VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Không có

SỰ HẠN CHẾ

RF: Xin lưu ý rằng sự pha loãng của nhiều điều khiển trên một số hệ thống nhất định có thể dẫn đến sự phục hồi của R.F. chưa được kiểm soát. Điều này là do các tương tác Immunoglobulin phức tạp.

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô nội kiểm Protein dạng lỏng được xét nghiệm trong khoảng 100 phòng xét nghiệm và các giá trị được chỉ định từ một sự đồng nhất về kết quả thu được từ các phòng xét nghiệm này. Với mỗi lô, phạm vi kiểm soát được cung cấp cho cá nhân tham số và từng phương pháp tham số.

Nếu không có phương pháp nào, hãy liên hệ Randox Laboratories - Dịch vụ Kỹ thuật, Bắc Ireland, số điện thoại: +44 (0) 28 9445 1070 hoặc email Technical.Services@randox.com

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com