

TIẾNG VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH BNP: RQ9165

#### XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHÂN

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần "ĐẶC TÍNH" dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lô mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào [www.riqas.net](http://www.riqas.net) để xác nhận thời gian chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

#### ĐẶC ĐIỂM:

Mỗi hộp bao gồm 6 lọ mẫu lỏng, thể tích mỗi lọ 1ml (6 x 1 ml) được đánh số thứ tự từ 7-12 theo số thứ tự mẫu phân tích

#### CHUẨN BỊ/BẢO QUẢN/ĐỘ BỀN CỦA MẪU

Đồng nhất mẫu bằng cách lắc nhẹ nhàng, Chú ý không được lắc mạnh. Sau khi mở nắp, mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày ở +2 - +8 °C. Mẫu được xử lý và phân tích giống mẫu bệnh nhân.

#### ĐỘ AN TOÀN

Cảnh báo: Có khả năng độc hại về sinh học.

Mẫu được lấy hoàn toàn từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV, HbsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tuyệt đối nên mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm.

Chỉ dùng cho phân tích trong ống nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.

\*LƯU Ý QUAN TRỌNG: Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước **17:00 GMT** ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Kết quả phân tích sẽ không được chấp nhận sau hạn chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.

#### TÜRKÇE

BNP PROGRAMI: RQ9165

#### KİT ÖZELLİKLERİNİN VE ULAŞMA TARİHİNİN DOĞRULANMASI

Lütfen doğru sayıda örneğin bulunduğu ve örneklerin görünüşlerinin aşağıda ÖZELLİKLER bölümünde belirtildiği gibi olduğunu doğrulayınız. Lütfen şişelerden hiç birinin kırık olmadığını doğrulayınız ve eğer herhangi bir uygunsuzluk varsa derhal yerel RANDOX sorumlunuzu uyarın. Son olarak, lütfen [www.riqas.net](http://www.riqas.net) 'e giriş yaparak bu kiti hatasız teslim aldiğiniz tarihi doğrulayınız.

#### ÖZELLİKLER

Paket; her biri 1 ml likit örnek içeren 6 şişeden oluşur (6 x 1 ml). Şişeler, örnek numaraları ile etiketlenmiştir.

#### NUMUNE HAZIRLAMA / DEPOLAMA / NUMUNELERIN STABILITESI

Numunelerin hafifçe döndürülerek homojen olduğundan emin olun, şişeleri sallamayın. Lütfen, örneği açtıktan sonraki 2 gün içerisinde çalışınız. Örneklerle, hasta örnekleri ile aynı şekilde muamele edilmelidir. Örnekleri +2 ve +8 °C'de muhafaza ediniz.

#### GÜVENLİK

##### Uyarı: Potansiyel olarak biyolojik tehlili madde.

Bu ürünün elde edildiği insan kaynaklı materyal donor seviyesinde İnsan İmmünyetmezlik Virüsü (HIV 1, HIV 2) antikoru, Hepatit B yüzey Antijeni (HbsAg), ve Hepatit C Virüs (HCV) antikoru açısından test edilmiş ve NON-REAKTİF olarak bulunmuştur. Bu testler için FDA onaylı metotlar kullanılmıştır. Fakat yine de, hiç bir metot enfeksiyon ajanlarının yokluğu için tam garanti vermediğinden bu materyal ve tüm hasta örnekleri muhtemel enfeksiyon hastalığı taşıyıcısı var所以说arak çalışılmalı ve uygun şekilde atığa gönderilmelidir.

Sadece IN VITRO kullanım içindir. Ağızla pipetlemeyiniz. Laboratuvar reaktiflerinin örneklemesi için gerekli normal önlemleri uygulayınız.

\* ÖNEMLİ NOT: Sonuçlar, RIQAS'a SON SONUÇ GÖNDERİM TARİHİ'nde saat **17:00 GMT**'de ulaşmış olmalıdır. Eğer ÖNERİLEN ANALİZ TARİHİ sizin için uygun değilse, sonuç gönderim tarihine yetişmesi için örneği daha erken analiz etmenizi öneririz. Geç sonuçlar, bir sonraki örneğin son sonuç gönderim tarihi sonrasında kabul edilmeyecektir.