



## Tiếng Việt

**Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo độ bão hòa oxy trong máu**

CO-OXIMETRY PROGRAMME: RQ9177

## XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần “ĐẶC TÍNH” dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào [www.riqas.net](http://www.riqas.net) để xác nhận thời gian chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

## ĐẶC ĐIỂM

1 hộp bao gồm 6 lọ mẫu đông khô, mỗi lọ 1 ml. Các lọ được dán nhãn tương ứng với thứ tự mẫu phân tích.

## CHUẨN BỊ/BẢO QUẢN/ỔN ĐỊNH CỦA MẪU

Đề vật liệu đạt đến nhiệt độ phòng trước khi hoàn nguyên.

Sử dụng pipet đã hiệu chuẩn để hoàn nguyên với thể tích nước khử ion được đo chính xác là 1,0 ml và để yên trong 10 phút.

Giữ lọ ở góc 45° và xoay nhẹ trong 30 giây.

Nhẹ nhàng đảo ngược lọ vài lần để đảm bảo mọi hạt bám vào nút cao su sẽ được hòa tan.

Sau khi hoàn nguyên, vật liệu ổn định trong 24 giờ ở 2-8°C.

## SỰ AN TOÀN

Vật liệu có nguồn gốc từ bò đã được sử dụng để sản xuất sản phẩm này. Các vật liệu được sử dụng đã vượt qua quá trình kiểm tra trước và sau khi giết mổ và/hoặc có nguồn gốc từ động vật không có dấu hiệu lâm sàng của bất kỳ bệnh nào có thể truyền sang người hoặc động vật thông qua sản phẩm đó. Tuy nhiên, nên xử lý sản phẩm này với các biện pháp phòng ngừa tương tự như đối với mẫu bệnh phẩm.

Chỉ sử dụng IN VITRO.

**\* LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Kết quả phải đến RIQAS trước 17:00 giờ GMT vào **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG**. Nếu **NGÀY GỌI Ý PHÂN TÍCH** không đủ thời gian, chúng tôi khuyên bạn nên phân tích mẫu sớm hơn để đảm bảo bạn đáp ứng đúng thời hạn. Kết quả muộn sẽ không được chấp nhận sau ngày cuối cùng của mẫu tiếp theo.

Các thông tin về **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG** theo tháng có thể được tải về trên website của RIQAS tại [www.riqas.com](http://www.riqas.com) (phần Calendar) và cũng sẽ đi kèm theo tờ kit insert tiếng Anh của từng hộp hóa chất.

*Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:*

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

*Điện thoại: 024.35772266*

*Email: [gsmmed.hotrokythuat@gmail.com](mailto:gsmmed.hotrokythuat@gmail.com)*