

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Glucose/Ketones: RQ9188
RIQAS POINT OF CARE Glucose/Ketones: RQ9188

XÁC NHẬN ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ SẢN PHẨM VÀ NGÀY NHẬN

Vui lòng xác nhận rằng có đúng số lượng mẫu và mẫu của bạn có hình dạng như được chỉ ra trong phần ĐẶC ĐIỂM bên dưới. Vui lòng xác nhận rằng lọ không bị hỏng và thông báo ngay cho đại diện Randox tại địa phương của bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào.

ĐẶC ĐIỂM

Một mẫu 400 µl sẽ được gửi. Lọ sẽ được dán nhãn tên mẫu.

SỰ CHUẨN BỊ

Các mẫu đã sẵn sàng để sử dụng. Mẫu được vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

Cuộn ống qua lại trong 20-30 giây, thỉnh thoảng đảo ngược, KHÔNG LẮC. Tránh để bọt khí lọt vào mẫu. Mẫu ổn định trong 28 ngày. Sau khi mở, vui lòng phân tích mẫu trong vòng 2 ngày. Các mẫu phải được xử lý giống như cách xử lý mẫu bệnh phẩm. Mẫu có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 25°C khi không sử dụng cho đến ngày hết hạn lấy mẫu.

SỰ AN TOÀN

Các mẫu có nguồn gốc từ người hiến máu. Chỉ những hiến tặng không có phản ứng hoặc âm tính với các thông số dưới đây mới được lưu hành: Viêm gan B, HIV và Viêm gan C, RNA HIV-1 và RNA HCV. Tuy nhiên, để bảo vệ hoàn toàn, mẫu nên được xử lý như mẫu bệnh nhân. Chỉ sử dụng **IN VITRO**.

*** LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Kết quả phải được gửi tới RIQAS trước **HẠN CUỐI CÙNG**. Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích mẫu để đảm bảo bạn đáp ứng thời hạn. Kết quả muộn sẽ không được chấp nhận sau ngày hạn cuối cùng

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm tại chỗ Glucose/Ketones

TRẢ KẾT QUẢ

Chu kỳ 2025/2026

Mẫu	Ngày vận chuyển mẫu	Ngày trả kết quả
6-6/25	26-5-25	25-6-25
6-9/25	26-8-25	24-9-25
6-12/25	24-11-25	24-12-25
4-3/26	23-2-26	25-3-26

Đây là ngày vận chuyển và trả kết quả tạm thời và có thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới người tham gia.

Các thông tin về **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG** theo tháng có thể được tải về trên website của RIQAS tại www.riqas.com (phần Calendar) và cũng sẽ đi kèm theo tờ kit insert tiếng Anh của từng hộp hóa chất.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hàng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com

RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 28 9445 4399

Email: riqaspoc@randox.co.uk Website: qc.randox.com

Page 1/1

RANDOX

Tiếng Việt

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Glucose/Ketones: RQ9200

RIQAS POINT OF CARE Glucose/Ketones: RQ9200

XÁC NHẬN ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ SẢN PHẨM VÀ NGÀY NHẬN

Vui lòng xác nhận rằng có đúng số lượng mẫu và mẫu của bạn có hình dạng như được chỉ ra trong phần ĐẶC ĐIỂM bên dưới. Vui lòng xác nhận rằng lọ không bị hỏng và thông báo ngay cho đại diện Randox tại địa phương của bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào.

ĐẶC ĐIỂM

Một mẫu 400 µl sẽ được gửi. Lọ sẽ được dán nhãn tên mẫu.

SỰ CHUẨN BỊ

Các mẫu đã sẵn sàng để sử dụng. Mẫu được vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

Cuộn ống qua lại trong 20-30 giây, thỉnh thoảng đảo ngược, **KHÔNG LẮC**. Tránh để bọt khí lọt vào mẫu. Mẫu ổn định trong 28 ngày. Sau khi mở, vui lòng phân tích mẫu trong vòng 2 ngày. Các mẫu phải được xử lý giống như cách xử lý mẫu bệnh phẩm. Mẫu có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 25°C khi không sử dụng cho đến ngày hết hạn lấy mẫu.

SỰ AN TOÀN

Các mẫu có nguồn gốc từ người hiến máu. Chỉ những hiến tặng không có phản ứng hoặc âm tính với các thông số dưới đây mới được lưu hành: Viêm gan B, HIV và Viêm gan C, RNA HIV-1 và RNA HCV. Tuy nhiên, để bảo vệ hoàn toàn, mẫu nên được xử lý như mẫu bệnh nhân. Chỉ sử dụng **IN VITRO**.

* **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Kết quả phải được gửi tới RIQAS trước **HẠN CUỐI CÙNG**. Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích mẫu để đảm bảo bạn đáp ứng thời hạn. Kết quả muộn sẽ không được chấp nhận sau ngày hạn cuối cùng

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm tại chỗ Glucose/Ketones		
TRẢ KẾT QUẢ		
Chu kỳ 2024/25		
Mẫu	Ngày vận chuyển mẫu	Ngày trả kết quả
5-5/24	29-4/24	29-5/24
5-6/24	27-5/24	26-6/24
5-7/24	24-6/24	24-7/24
5-8/24	29-7/24	28-8/24
5-9/24	26-8/24	29-9/24
5-10/24	30-9/24	30-10/24
5-11/24	28-10/24	27-11/24
5-12/24	25-11/24	25-12/24
5-1/25	30-12/24	29-1/25
5-2/25	27-1/25	26-2/25
5-3/25	24-2/25	26-3/25
5-4/25	31-3/25	30-4/25

Đây là ngày vận chuyển và trả kết quả tạm thời và có thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới người tham gia. Các thông tin về **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG** theo tháng có thể được tải về trên website của RIQAS tại www.riqas.com (phần Calendar) và cũng sẽ đi kèm theo tờ kit insert tiếng Anh của từng hộp hóa chất.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hang tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com

RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 28 9445 4399

Email: rigaspoc@randox.co.uk Website: qc.randox.com

Page 1/1

RANDOX

Tiếng Việt

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Glucose/Ketones: RQ9201

RIQAS POINT OF CARE Glucose/Ketones: RQ9201

XÁC NHẬN ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ SẢN PHẨM VÀ NGÀY NHẬN

Vui lòng xác nhận rằng có đúng số lượng mẫu và mẫu của bạn có hình dạng như được chỉ ra trong phần ĐẶC ĐIỂM bên dưới. Vui lòng xác nhận rằng lọ không bị hỏng và thông báo ngay cho đại diện Randox tại địa phương của bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào.

ĐẶC ĐIỂM

Một mẫu 400 µl sẽ được gửi. Lọ sẽ được dán nhãn tên mẫu. Mẫu ổn định trong 28 ngày

SỰ CHUẨN BỊ

Các mẫu đã sẵn sàng để sử dụng. Mẫu được vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

Cuộn ống qua lại trong 20-30 giây, thỉnh thoảng đảo ngược, KHÔNG LẮC. Tránh để bọt khí lọt vào mẫu. Mẫu ổn định trong 28 ngày. Sau khi mở, vui lòng phân tích mẫu trong vòng 2 ngày. Các mẫu phải được xử lý giống như cách xử lý mẫu bệnh phẩm. Mẫu có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 25°C khi không sử dụng cho đến ngày hết hạn lấy mẫu.

SỰ AN TOÀN

Các mẫu có nguồn gốc từ người hiến máu. Chỉ những hiến tặng không có phản ứng hoặc âm tính với các thông số dưới đây mới được lưu hành: Viêm gan B, HIV và Viêm gan C, RNA HIV-1 và RNA HCV. Tuy nhiên, để bảo vệ hoàn toàn, mẫu nên được xử lý như mẫu bệnh nhân. Chỉ sử dụng **IN VITRO**.

* **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Kết quả phải được gửi tới RIQAS trước **HẠN CUỐI CÙNG**. Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích mẫu để đảm bảo bạn đáp ứng thời hạn. Kết quả muộn sẽ không được chấp nhận sau ngày hạn cuối cùng

Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm tại chỗ Glucose/Ketones

TRẢ KẾT QUẢ

Chu kỳ 2023/24

Mẫu	Ngày vận chuyển mẫu	Ngày trả kết quả
5-06/24	27-05/24	26-06/24
5-08/24	29-07/24	28-08/24
5-10/24	30-09/24	30-10/24
5-12/24	25-11/24	25-12/24
5-02/25	27-01/25	26-02/25
5-04/25	24-03-25	30-04/25

Đây là ngày vận chuyển và trả kết quả tạm thời và có thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới người tham gia.

Các thông tin về **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG** theo tháng có thể được tải về trên website của RIQAS tại www.riqas.com (phần Calendar) và cũng sẽ đi kèm theo tờ kit insert tiếng Anh của từng hộp hóa chất.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hàng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com

RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 28 9445 4399

Email: riqaspoc@randox.co.uk Website: qc.randox.com

Page 1/1