

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### RANSOD CONTROL

**Mã code sản phẩm:** SD 126

**Đóng gói:** 10 x 1 ml

### CHUẨN BỊ

Cẩn thận pha lại từng lọ máu đông khô với 1 ml nước cất hai lần. Đóng chai và để yên trong 15 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo mẫu đông khô được hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng. Đảo ngược chai để đảm bảo rằng tất cả các dấu vết của vật liệu khô được hòa tan. Tránh sự hình thành bọt. Không lắc.

Pha loãng tiếp với tỷ lệ 1:200 bằng chất pha loãng Ransod (Cat. No. SD 124).

### ỔN ĐỊNH

Mẫu đông khô ổn định đến ngày hết hạn sử dụng khi bảo quản ở +2°C đến +8°C. Mẫu sau khi hoàn nguyên ổn định trong vòng 10 ngày ở +2°C đến +8°C.

### GIỚI HẠN CỦA SUPEROXIDE DISMUTASE

GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG = 307 +/- 55 U/ml

### LƯU Ý

Nguyên liệu này hoàn toàn có nguồn gốc từ bò và không chứa chất phụ gia từ nguồn con người.

*Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:*

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: [gsmmed.trang@gmail.com](mailto:gsmmed.trang@gmail.com)