

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CALIBRATOR SERIES

(Tên trên vỏ hộp: **TXB CARDIO CAL**)

Mã code sản phẩm: TBX 3132

Đóng gói: 6 x 3 m

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dòng hiệu chuẩn Randox TxB Cardio™ dành cho sử dụng chẩn đoán IN VITRO trong việc hiệu chuẩn TxB Cardio™ trên các hệ thống hóa học lâm sàng.

CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

Chỉ dùng cho chẩn đoán IN VITRO. Không pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng thí nghiệm.

Tất cả các thuốc thử có chứa Natri Azide. Tránh ăn hoặc tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Trong trường hợp tiếp xúc với da, rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng với nhiều nước. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc nếu nuốt phải, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Natri Azide phản ứng với chì và ống nước bằng đồng, tạo thành các azide có khả năng gây nổ. Khi thải bỏ các thuốc thử như vậy, xả với một lượng nước lớn để ngăn chặn azide tích tụ. Bề mặt kim loại tiếp xúc nên được làm sạch bằng natri hydroxit 10%.

Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn theo yêu cầu.

Các thuốc thử phải được sử dụng chỉ cho mục đích của nhân viên phòng xét nghiệm có trình độ phù hợp, trong điều kiện phòng xét nghiệm thích hợp.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bộ hiệu chuẩn TxB Cardio™ được cung cấp sẵn sàng để sử dụng và ổn định đến hết hạn sử dụng khi được đậy nắp và bảo quản ở nhiệt độ +2 °C đến +8 °C trong trường hợp không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên hút lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào cũng KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI vào lọ ban đầu.

Sau khi mở nắp, Chất hiệu chuẩn này ổn định trong vòng 28 ngày ở +2°C đến +8°C.

VẬT LIỆU CUNG CẤP

TxB Cardio Calibrators

Level 1	(1 x 3 ml)	Level 4	(1 x 3 ml)
Level 2	(1 x 3 ml)	Level 5	(1 x 3 ml)
Level 3	(1 x 3 ml)	Level 6	(1 x 3 ml)

GIÁ TRỊ ĐÁNH GIÁ

Việc chỉ định TxB Cardio™ Calibrators đã được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Randox bằng cách sử dụng phương pháp miễn dịch tăng cường latex. Các giá trị được chỉ định cho Bộ hiệu chuẩn TxB Cardio™ được liệt kê bên dưới.

CALIBRATOR LEVEL	LOT NO.	GIÁ TRỊ ĐÍCH	HẠN SỬ DỤNG
1	521TX	0 pg/ml	2017-02
2	522TX	825 pg/ml	2017-02
3	523TX	1518 pg/ml	2017-02
4	524TX	2244 pg/ml	2017-02
5	525TX	3351 pg/ml	2017-02
6	526TX	6386 pg/ml	2017-02

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com