

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## LIQUID TUMOUR MARKER CONTROL - LEVEL 2

Tên trên vỏ hộp: TMR LIQ CONTROL 2

Mã code sản phẩm: TU5086

Đóng gói: 6x3ml

## MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất nội kiểm tra chất lượng chỉ điểm khối u dạng lỏng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Các hóa chất nội kiểm chỉ điểm khối u dạng lỏng dùng để kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại.

Các thông số xét nghiệm :Alphaphoetoprotein, CA15-3, CA 19-9, CA 125, CA 27-29, CA 72-4, Cyfra 21-1, Kháng nguyên Carcinoembryonic,Enolase đặc hiệu ,Neuron, Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, Kháng nguyên đặc trưng tuyến tiền liệt và Thyroglobulin and serum protein analysis of Beta-2-microglobulin, Ferritin and Human Chorionic Gonadotropin (Total Beta hCG).

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

Các hóa chất nội kiểm chỉ điểm khối u dạng lỏng có 3 mức là mức 1, mức 2 và mức 3. Các giá trị đích và các dải giá trị nội kiểm cho các thông số chỉ điểm khối u được liệt kê trong tờ kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

## CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Các hóa chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích *in vitro*. Không pipet bằng mồm. Sử dụng và xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Hãy yêu cầu nếu bạn cần các tờ công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS).

## BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

**SAU KHI MỞ NẮP:** Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C, ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ + 2 ° C đến + 8 ° C nếu không nhiễm bẩn

**TRƯỚC MỞ NẮP:** Giữ lạnh ở +2°C đến +8°C. Ổn định đến ngày hết hạn in trên từng lọ riêng lẻ. Sự ô nhiễm vi khuẩn của huyết thanh sẽ làm giảm sự ổn định của nhiều thành phần. Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn, lọ phải được loại bỏ và lấy lại một lọ mới.

## CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Hóa chất này dạng lỏng sẵn sàng để sử dụng ngay.

## VẬT LIỆU SẴN CÓ

Liquid Tumour Marker Control - Level 2 - 6 x 3 ml

## VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Không áp dụng

## CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô hóa chất nội kiểm chỉ điểm khối u dạng lỏng được phân phối đến 1 số phòng xét nghiệm không thuộc nhà sản xuất. Các giá trị kiểm soát sẽ được tính từ thống kê của các phòng xét nghiệm đó và những xét nghiệm làm nội bộ ở Randox Laboratories Ltd. Giá trị trung bình và dải giá trị được cung cấp ở đây là nhằm mục đích hỗ trợ phòng xét nghiệm cho đến khi phòng xét nghiệm đó tự tính ra trung bình và SD cho hệ thống xét nghiệm của mình.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

Điện thoại: 024.35772266

Email: [gsmmed.trang@gmail.com](mailto:gsmmed.trang@gmail.com)