

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 3

(Tên trên vỏ hộp: LIQ URN CONTROL 3)

Mã code sản phẩm: UC 5075

Đóng gói: 10 x 10 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất kiểm tra độ chính xác và lặp lại của các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Được thiết kế tương tự mẫu bệnh nhân, chạy theo nguyên lý của máy để phát hiện sai sót. Bằng cách so sánh kết quả phân tích với giá trị nội kiểm được cung cấp trong kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

Kiểm tra độ chính xác và lặp lại của xét nghiệm đối với các thông số Amylase, Calcium, Chloride, Cortisol, Creatinine, Glucose, hCG pregnancy, Magnesium, Microalbumin, Osmolality, pH, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, Specific Gravity, Urea and Uric Acid (Urate).

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán *in-vitro* với các thuốc thử và thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo. Không sử dụng khi đã quá hạn sử dụng in trên nhãn.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan và giang mai bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không phương pháp nào có thể bảo đảm tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân. Có chứa sodium azide, tránh nuốt, dính ra da hay màng nhầy cơ thể. Nếu dính, rửa thật sạch bằng nhiều nước. Nếu dính vào mắt hay nuốt phải thì gặp bác sỹ. Sodium azide có thể phản ứng với ống thoát nước đồng và chì, vì vậy khi đổ vào hệ thống thoát nước phải đổ cùng rất nhiều nước. Nếu dính ra kim loại có thể trung hòa bằng sodium hydroxide 10%.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bảo quản ở 2-8°C.

Sau khi mở nắp mẫu ổn định trong vòng 30 ngày ở 2-8°C.

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng. Mở nắp cho vào máy phân tích như mẫu bệnh nhân và so sánh kết quả phân tích với giá trị trong tờ kit insert (hoặc đĩa CD) đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

VẬT LIỆU SẴN CÓ

Liquid Urine Control - Level 3 10 x 10 ml

VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Không có

CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô nội kiểm nước tiểu được kiểm tra tại một số phòng xét nghiệm bên ngoài. Các giá trị được sự nhất trí về kết quả thu được bởi các phòng xét nghiệm nội bộ được thực hiện tại Randox Laboratories Ltd.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com