

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### URINALYSIS CONTROL – LEVEL 1

(Tên trên vỏ hộp: URNAL CONTROL 1)

**Mã code sản phẩm:** UC 5033

**Đóng gói:** 12 x 12 ml

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Chất chuẩn được thiết kế sử dụng để kiểm tra chất lượng của xét nghiệm nước tiểu bằng que thử.

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hóa chất nội kiểm que thử nước tiểu có 2 mức, mức 1 và mức 2. Các giá trị đích và các dải giá trị kiểm soát nội kiểm được liệt kê trong tờ kit insert đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất đối với các thông số Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, HCG, Ketones, Leukocytes, Nitrite, pH, Protein, Specific Gravity and Urobilinogen.

### CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN

Các hóa chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích in vitro. Không pipet bằng mồm. Sử dụng và xử lý cẩn thận như với các hóa chất xét nghiệm thông thường khác.

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Hãy yêu cầu nếu bạn cần các tờ công bố về Dữ liệu An toàn và Sức khỏe (MSDS).

### BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

**SAU KHI MỞ NẮP:** Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C, ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ + 2 ° C đến + 25° C hoặc nhúng tối đa 20 lần que thử vào lọ mẫu nếu không nhiễm bẩn. Không để đông.

**CHƯA MỞ NẮP:** Bảo quản ở 2-8°C. Ổn định đến hạn sử dụng in trên lọ mẫu.

### CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng.

Mở nắp, nhúng ngập que thử vào lọ mẫu, cho que thử vào máy phân tích như mẫu bệnh nhân và so sánh kết quả phân tích với giá trị trong tờ kit insert (hoặc đĩa CD) đi kèm hộp hóa chất của nhà sản xuất.

### VẬT LIỆU SẴN CÓ

Urinalysis Control – Level 1: 12 x 12 ml

### VẬT LIỆU KHÔNG KÈM THEO

Không có

### CÁC GIÁ TRỊ NỘI KIỂM

Mỗi lô nội kiểm que thử nước tiểu được kiểm tra tại một số phòng xét nghiệm bên ngoài và các dải giá trị thu được từ sự đồng thuận về kết quả của các phòng xét nghiệm đó. Với mỗi lô, dải giá trị cung cấp cho các thông số độc lập và mỗi phương pháp cho từng thông số.

*Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:*

**Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS**

*Điện thoại: 024.35772266*

*Email: gsmed.trang@gmail.com*