

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIQUID URINE CONTROL - LEVEL 3 (LIQ URN CONTROL 3)

(Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số xét nghiệm sinh hoá nước tiểu dạng lỏng nồng độ cao)

Tên trên vỏ hộp: LIQ URN CONTROL 3

Mã code sản phẩm: UC 5075

Đóng gói: 10 x 10 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Randox Liquid Urine Control - Level 3 được dùng để chẩn đoán trong ống nghiệm, trong kiểm soát chất lượng Amylase, Calcium, Chloride, Cortisol, Creatinine, Glucose, hCG pregnancy, Magnesium, Microalbumin, Osmolality, pH, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, Specific Gravity, Urea và Uric Acid (Urate) trên các hệ thống xét nghiệm miễn dịch và hóa sinh lâm sàng. Liquid Urine Control dùng để kiểm soát độ chính xác. Xét nghiệm creatinine trong Liquid Urine Controls có thể không phù hợp để sử dụng trên một số hệ thống Vitros.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

Vật liệu Kiểm soát Chất lượng có nguồn gốc từ nước tiểu người thu được từ những người tình nguyện hiến tặng. Khuyến cáo rằng sản phẩm này được xử lý với các biện pháp phòng ngừa tương tự được sử dụng cho các mẫu bệnh phẩm.

Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Không hút pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ con người, từ đó sản phẩm này được tạo ra, đã được xét nghiệm ở cấp độ người hiến tặng để tìm kháng thể vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể vi rút viêm gan C (HCV) và được phát hiện là KHÔNG PHẢN ỨNG. Các phương pháp được FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm này. Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân lây nhiễm, vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh phẩm phải được xử lý như thể có khả năng truyền bệnh truyền nhiễm và được xử lý theo đó.

Bảng dữ liệu về sức khỏe và an toàn có sẵn trên www.randox.com.

Vui lòng vứt bỏ tất cả các vật liệu sinh học và hóa học theo hướng dẫn của địa phương.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

CHƯA MỞ: Liquid Urine Control ổn định cho đến ngày hết hạn được in trên nhãn riêng lẻ, khi được bảo quản trong tủ lạnh ở +2°C đến +8°C.

ĐÃ MỞ: Liquid Urine Control ổn định trong 30 ngày ở +2°C đến +8°C khi mở ra, nếu được đậy nắp trong hộp ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Sau khi sử dụng, KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI bất kỳ sản phẩm còn dư nào vào lọ ban đầu.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Liquid Urine Controls được cung cấp sẵn sàng để sử dụng.

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

Liquid Urine Control - Level 3 10 x 10 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Không áp dụng.

GIÁ TRỊ ÁN ĐỊNH

Mỗi lô Liquid Urine Control được gửi đến một số phòng xét nghiệm bên ngoài. Các giá trị được chỉ định từ sự đồng thuận về kết quả thu được từ các phòng xét nghiệm này và xét nghiệm nội bộ được thực hiện tại Randox Laboratories Ltd. Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.randox.com/> để biết thêm chi tiết.

*Lưu ý: * Giá trị đích, phạm vi của thông số tùy thuộc vào từng lô theo kit insert đi kèm của nhà sản xuất. Mỗi lô sản xuất có thể có thêm hướng dẫn riêng của nhà sản xuất cho lô đó, vui lòng kiểm tra bản tiếng Anh từ <https://smartdocs.randox.com/> để biết thêm chi tiết.*

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com